

リカバリーインナーこりラック

磁気インナー（マグネットシルエッター）


取扱説明書

後脇から肩へ
引っ張り
猫背改善効果

胸を大きく囲い
安心バスト構造
(取りはずし可
能なカップ付き
好きなカップ
を入れる事も可
能)

肋骨を裏当てで
締める事により
キレイな姿勢を
KEEP


気になる
ポッコリお腹を
裏当てで押さえて
スッキリお腹に

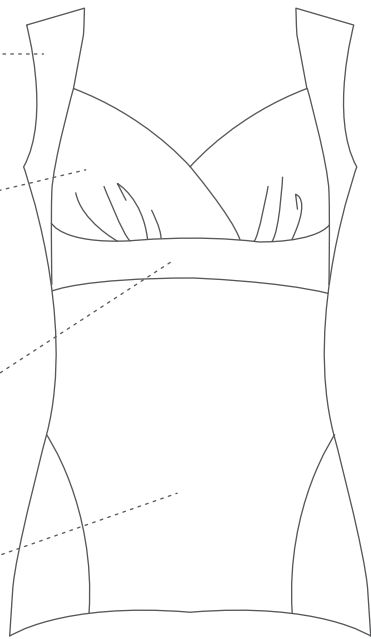

4つのネオジム磁石の
磁力を利用し、
装着部位のこり及び
血行を改善する

肩甲骨を
引き寄せられる
クロス設計で姿勢を整える


腰を裏当てで
押さえて
すっきりウエスト

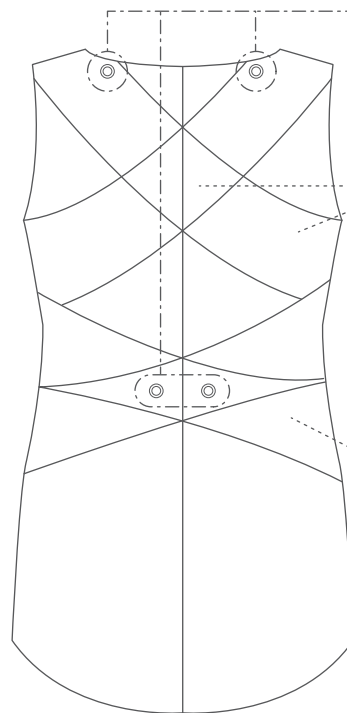


発売者：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5 www.tsukamoto-aim.co.jp

開封後の返品・交換は、不良品を除き承れません。
あらかじめご了承ください。


商品の着用方法

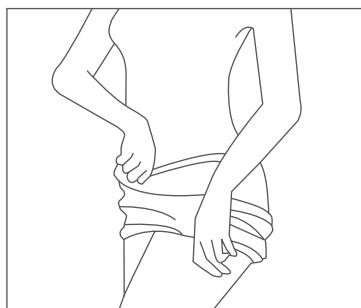


1. 両脇部分を両手で持ち、下から履いて着用します

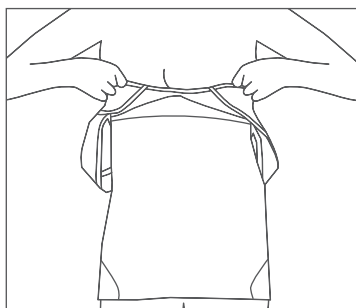


2. アンダーバスト部分を胸下まで引き上げます

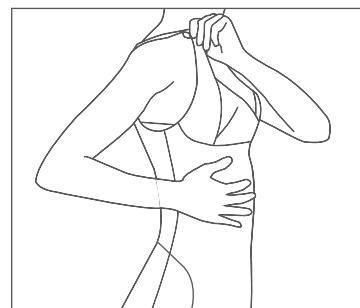

3. 肩布に腕を通します

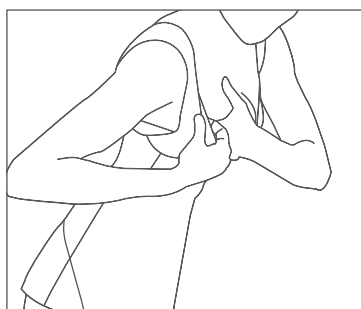

4. 前かがみになり、バストを後脇からしっかりとカップに入れます

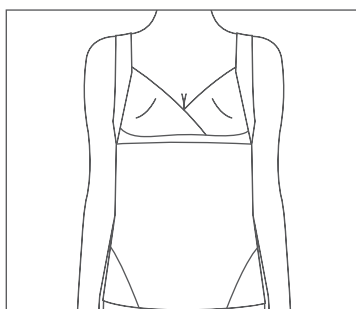

5. バスト位置と裾を整えます

本品は、非常にデリケートな素材を使用しておりますので下記に注意してください。

- ・着脱の際は、爪を立てたり強い力で引っ張ったりしないでください
- ・特にお尻回り（生地が1枚の部分）は破れやすいので充分に注意してください
- ・爪やアクセサリーなどで傷をつけないようにしてください

お洗濯の際は...

本製品は永久磁石を装着しているため、ネットに入れての洗濯をおすすめします

添付文書

2021年1月（第2版）

2017年9月（新様式第1版）

認証番号：221AIBZX00029000

機械器具 81 磁気治療器

管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器 71016000

磁気インナー（マグネットシルエッター）

【禁忌・禁止】

- 改造するなど本来の目的外の使用を禁止する。
- 次の方は、使用しないでください。
 - 1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型の医用電気機器を使用している方。
 - 2) 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している方。

【形状・構造及び原理等】

本製品は、永久磁石をシルエッターに装着したものであり、磁力を利用して患部を治療するための家庭用永久磁石磁気治療器である。

磁石：ネオジム磁石 4個付き

磁束密度：100mT±20mT

【使用目的又は効果】

永久磁石の磁力による装着部位のこり及び血行を改善する。一般家庭で使用すること。

【使用方法等】

シルエッターとして使用する。

【使用上の注意】

- 下記に該当する方は、使用前に医師に相談してください。
 - 1) 悪性腫瘍のある方。
 - 2) 心臓に障害のある方。
 - 3) 妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。
 - 4) 糖尿病などによる、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。
 - 5) 皮膚に感染症及び/又は創傷のある方。
 - 6) 安静を必要とする方。
 - 7) 体温38℃以上（有熱期）の方。
 - 8) 捻挫、肉離れなど急性疼痛性疾患の方。
- 使用前には次のことにご注意ください。
 - 1) 時計、磁気カードなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
 - 2) 磁石装着部に破れがある場合には使用を中止してください。
 - 3) 長時間使用しなかった場合は、金属など異物が付着していないか確認のうえご使用ください。

●使用中は次のことにご注意ください。

- 1) 機器に故障が発見された場合には直ちにご使用を中止してください。
- 2) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は直ちにご使用を中止してください。
- 3) 体に異常を感じたときは直ちにご使用を中止し、医師にご相談ください。

●使用しても効果が現れない場合は医師又は専門家にご相談ください。

●病院などで治療や検査を受けるときの注意

- 1) 治療や検査の種類により本機器に悪影響を与える場合があります。係りの方に本機器をはずすかどうかお尋ねください。
- 2) MRI 検査のときは本機器を検査室に持ち込まないでください。事故や故障の原因となります。

【保管方法及び有効期間等】

室温に保管してください。

【取扱い上の注意】

- 1) 廃棄する際にはお住まいの市町村・自治体の区分に従ってください。
- 2) 他の治療器と併用しないでください。
- 3) 磁石装着部へのアイロンのご使用は避けてください。
- 4) 高温でのタンブル乾燥機のご使用は避けてください。
- 5) サウナで使用しないでください。やけどの恐れがあります。
- 6) 頭部には使用しないでください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前には、磁石装着部に金属など異物が付着していないことを確認のうえ、ご使用ください。
- 2) 故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店若しくは製造販売元に連絡してください。

【包装】

1枚/箱又は袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ボディーオーラ株式会社

住所：〒674-0082

兵庫県明石市魚住町中尾 1032 番地

電話：078-946-8055

許可番号：28B2X10010

表面の取扱説明書をご参照ください。